

# User instruction | Gebruikersinstructie

## Filtering half mask FFP2

- 1 Wash your hands.** | Was je handen.
- 2 Take the mask out of the package.** | Haal het masker uit de verpakking.
- 3 Check if the mask is undamaged. When damaged, dispose the mask.** | Controleer of het masker onbeschadigd is. Indien beschadigd, gooi het masker weg.
- 4 Take the lower elastic band and open the mask.** | Pak de onderste elastische band en open het masker.
- 5 Pull the elastic band over your head, placing the mask over nose and mouth.** | Trek het elastiek over je hoofd en plaats het masker over je neus en mond.
- 6 Position the elastic bands; the top one above the ear, the lower one beneath the ear.** | Plaats de bovenste elastiek boven het oor en het onderste elastiek onder het oor.
- 7 If the lower elastic band hangs loose, place it over the top of your head.** | Indien het onderste elastiek los hangt, plaats het hoger op je hoofd.
- 8 Press the nose clip firmly so it fits the shape of your nose.** | Druk de neusklem stevig aan zodat het zich vormt aan de vorm van je neus.
- 9 Place both hands in front of the mask and firmly breath out. Check if air escapes past the mask. If that is the case, reposition the mask and try again. In case air keeps escaping past the mask, you can not use this mask.** | Plaats beide handen voor het masker en adem stevig uit. Controleer of er lucht langs het masker ontsnapt. Als dat het geval is, herpositioneer het masker en probeer het opnieuw. Indien er lucht langs het masker blijft ontsnappen, mag je dit masker niet gebruiken.

