

# User instruction | Gebruikersinstructie | Gebrauchsanweisung

## Filtering half mask CTR / Partikelfiltrierende Halbmaske CTR

- 1 **Wash your hands.** | Was je handen. | Hände waschen.
- 2 **Take the mask out of the package.** | Haal het masker uit de verpakking. | Maske aus der Verpackung nehmen.  
  
**Check if the mask is undamaged. When damaged, dispose the mask.** | Controleer of het masker onbeschadigd is. Indien beschadigd, gooi het masker weg. | Vergewissern Sie sich, dass die Maske keine Schäden aufweist. Bei Beschädigung Maske wegwerfen.
- 3
- 4 **Take the lower elastic band and open the mask.** | Pak de onderste elastische band en open het masker. | Mit beiden Händen das untere Gummiband fassen und die Maske öffnen.
- 5 **Pull the elastic band over your head, placing the mask over nose and mouth.** | Trek het elastiek over je hoofd en plaats het masker over je neus en mond. | Maske über Mund und Nase platzieren und das Gummiband über den Kopf ziehen.
- 6 **Position the elastic bands; the top one above the ear, the lower one beneath the ear.** | Plaats de bovenste elastiek boven het oor en het onderste elastiek onder het oor. | Das obere Gummiband muss über, das untere unter den Ohren verlaufen.
- 7 **If the lower elastic band hangs loose, place it over the top of your head.** | Indien het onderste elastiek los hangt, plaats het hoger op je hoofd. | Sollte das untere Gummiband zu locker sitzen, ziehen Sie es nach oben über den Hinterkopf.
- 8 **Press the nose clip firmly so it fits the shape of your nose.** | Druk de neusklem stevig aan zodat het zich vormt aan de vorm van je neus. | Den Nasenbügel fest an den Nasenrücken andrücken, damit er sich der Form Ihrer Nase anpasst.  
  
**Place both hands in front of the mask and firmly breath out. Check if air escapes past the mask. If that is the case, reposition the mask and try again. In case air keeps escaping past the mask, you can not use this mask.** | Plaats beide handen voor het masker en adem stevig uit. Controleer of er lucht langs het masker ontsnapt. Als dat het geval is, herpositioneer het masker en probeer het opnieuw. Indien er lucht langs het masker blijft ontsnappen, mag je dit masker niet gebruiken. | Beide Hände vor die Maske halten und kräftig ausatmen, um festzustellen, ob an den Maskenrändern Luft entweicht. Wenn ja, Maskenposition überprüfen und Test wiederholen. Wenn weiterhin Luft entweicht, Maske nicht verwenden.
- 9